

Anleitung Drehmomentratsche

Das Drehmoment kann mittels Stellschraube auf den erforderlichen Wert eingestellt werden. Um das exakte Drehmoment zu erreichen muss die Strichmarkierung auf dem Ratschengriff mit der Strichmarkierung auf der Drehmoment Stellschraube eine Linie ergeben.

Um von einem größeren auf ein niedrigeres Drehmoment zu wechseln muss man zwei Umdrehungen unter das gewünschte Drehmoment losschrauben und anschließend wieder auf die gewünschte Markierung zuschrauben. Ein Blockier-Funktionsmodus ist für diese Drehmomentratsche möglich. Dazu schrauben Sie die Einstellschraube bis zum „R“.

1 **Reinigung und Pflege:**

Um Blut- und Geweberückstände zu entfernen muss die Drehmomentratsche dringend auseinandergenommen werden. Danach sind die Teile im Thermodesinfektor zu reinigen bzw. im Desinfektionsbad einzulegen und danach manuell zu reinigen. Eine anschließende Sterilisation im Autoklaven ist zwingend notwendig. Bitte beachten Sie hier die Vorgaben des Autoklavenherstellers.



2 **Demontage der Drehmomentratsche:**

Die Drehmoment-Stellschraube ganz lösen und entfernen. Danach die Feder aus dem Griffstück ziehen.



3

Mit dem Sechskanteinsatz wird die Schraube am Ratschenkopf gelöst damit der Deckel abgenommen werden kann.



4

Schmierstellen an Ratschenkopf, Ratschenrad und Ratschenherzstück.



- 5 Mit dem Sechskanteinsatz wird die Schraube am Ratschenkopf gelöst damit der Deckel abgenommen werden kann..



- 6 Alle Einzelteile der Drehmomentratsche.



HINWEIS

Der Zusammenbau der Drehmomentratsche erfolgt in umgekehrter Reihenfolge